

Gebruiksaanwijzing

Revamil[®] Fem

Product

Revamil[®] Fem

30 g honing voor vaginale toepassing

Eén vaginale applicator

Productbeschrijving

Revamil[®] Fem bestaat uit zuivere honing die onder gecontroleerde omstandigheden wordt geproduceerd. Dit gecontroleerde productieproces garandeert dat de honing geen residuen bevat van bestrijdingsmiddelen en een reproduceerbare kwaliteit heeft. Revamil[®] Fem wordt gammabestraald.

Revamil[®] Fem heeft een lage pH en zorgt daardoor voor een zuur milieu in de vagina. Een zuur milieu ondersteunt het herstel van een gezonde florabalanans in de vagina.

Wijze van toepassing

1. Draai de dop van de tube
2. Prik met de dop het afsluitmembraan van de tube door
3. Zet de applicator met één slag vast op de tube
4. Vul de applicator tot maximaal de eerste maatstreep door in de tube te knijpen
5. Breng de applicator tot achter in de vagina
6. Door de plunger van de applicator langzaam in te drukken komt Revamil[®] Fem in de vagina
7. De behandeling gedurende 3-4 weken elke dag herhalen
8. Bij voorkeur Revamil[®] Fem 's avonds voor het slapen gaan inbrengen

Indicatie

Revamil[®] Fem kan worden toegepast in geval van klachten die het gevolg zijn van disbalans van de vaginale microflora.

Contra indicaties

Niet toepassen in geval van overgevoeligheid voor honing.

Bijwerkingen

- Er zijn geen bijwerkingen bekend van Revamil[®] Fem
- Revamil[®] Fem bestaat uit pure honing en is daardoor stroperig en kleverig bij kamertemperatuur, en wordt vloeibaar bij lichaamstemperatuur.
- In geval van onverwachte (niet-vermelde) bijverschijnselen na de toepassing van Revamil[®] Fem, gaarne contact opnemen met uw huisarts of de producent.

Voorzorgsmaatregelen

- Niet gebruiken indien de tube beschadigd is
- Niet gebruiken indien applicator beschadigd is
- In de applicator achtergebleven honing verwijderen met warm water
- Revamil[®] Fem niet langer dan 30 dagen aaneengesloten gebruiken
- Gebruik eventueel een inlegkruisje voor het opvangen van honing die na het inbrengen uit de vagina kan lekken
- Door het sterilisatieproces bevatten de tubes extra lucht, de inhoud is echter gegarandeerd 30 gram honing.

Bewaarcondities

Tube bewaren bij 10-25°C

CE: Number 0344

Fabrikant / Manufacturer

Bfactory B.V., Wageningen (NL)
T +31(0)317475919
F +31(0)317475904

Verklaring symbolen

Houdbaarheidsdatum



Batchnummer



Bewaartemperatuur



Raadpleeg bijsluiter

